


ANVÄNDA SEATRAC MOVER FJÄRRKONTROLL

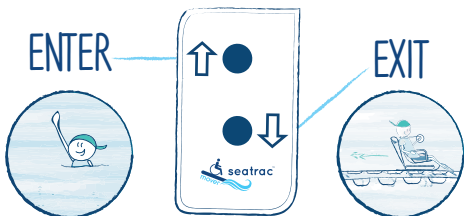

- ① För att åka till vattnet, håll den övre knappen nedtryckt konstant (ENTER)
- ② För att återvända till stranden, håll den nedre knappen nedtryckt konstant (ETER)
- ③ För att stoppa, släpp knappen

* Om fjärrkontrollen sitter i det vattentäta skyddet kan man simma med den. Ta INTE bort plastskyddet.

Gör en hel tur, i och ur vattnet innan du sätter dig i SEATRACs stol.

Se till att desinficera stolen före användning.

Vid höga vågor, undvik att använda SEATRAC.

